

URSAPHARM eusan			
Kunde:	Export EC - ALEXIAPHARMA S.A.	Lackierung:	/
Produkt:	PB HYLO-GEL 10 ML ATRO COMOD EC	Lackaussparung:	☐ /
Art.-Nr.:	90.2670	Pharmacode:	998
Format:	185 x 275 mm (Plano)	Zusatzspezifikation:	/
Blindenschrift (FS):	JA / NEIN	Sonstiges:	/
Material:	60 g/gm - Offset UPM Fine / Amber Graphic / Sora Medico / Primabrite Brilliant	Kleinste Schriftgröße:	11 pt
Kleber (ET):	/	Farbtoleranz vorhanden:	JA / NEIN Nr.: FTK_UPH_
Farbe 1:	☒ Schwarz (1/1-fbg.)	Farbtoleranz fertigen:	JA / NEIN Nr.: FTK_UPH_
Farbe 2:	☐ /	(6-fache Ausfertigung)	
Farbe 3:	☐ /		
Farbe 4:	☐ /	Korrekturabzug Nr.:	1 (Mock-up)
Farbe 5:	☐ /	Erstellt:	17.04.2024 A. Winter
Farbe 6:	☐ /	Freigabe Kunde:	
Farbe 7:	☐ /	Endfreigabe/Gut zum Druck:	

Instrucciones de uso

Por favor lea esta información con atención. Le será útil para aplicar HYLO COMOD FORTE® correctamente.

HYLO COMOD FORTE®

Hialuronato de sodio 2 mg/ml

Colirio estéril, libre de fosfatos y sin conservantes.

¿Qué es HYLO COMOD FORTE®?

HYLO COMOD FORTE® es una solución estéril para uso oftálmico, libre de fosfatos y sin conservantes.

Composición:

1 ml de HYLO COMOD FORTE® contiene 2 mg de hialuronato de sodio, ácido cítrico anhidro, citrato de sodio, sorbitol y agua para inyecciones.

¿Para qué se utiliza HYLO COMOD FORTE®?

HYLO COMOD FORTE® es un colirio indicado para la lubricación terapéutica e intensiva de la superficie ocular en situaciones graves y persistentes de sequedad ocular, así como en tratamientos postoperatorios oftálmicos.

¿Cuándo debe aplicarse HYLO COMOD FORTE®?

HYLO COMOD FORTE® está indicado para el tratamiento de la enfermedad del ojo seco.


HYLO COMOD FORTE® contiene la sal sódica del ácido hialurónico, una sustancia natural que se encuentra en el ojo y en otras partes del cuerpo. El hialuronato de sodio de cadena larga forma una película lubricante e hidratante, estable y de larga duración en la superficie del ojo. Gracias a esta propiedad bioadhesiva, la córnea y la conjuntiva están protegidas, y junto con las lágrimas fisiológicas el párpado se desliza perfectamente sobre la superficie del ojo. HYLO COMOD FORTE® contiene una mayor cantidad de hialuronato de sodio, lo que hace que sea más viscoso y de esta manera el ojo esté provisto de una película hidratante intensiva, calmante y de larga duración. Los síntomas persistentes o más graves se alivian y el ojo queda protegido contra la irritación.

La producción fisiológica de lágrimas puede disminuir debido a intervenciones quirúrgicas oftálmicas o lesiones oculares. Para la regeneración de estos tejidos es necesaria una lubricación e hidratación adecuada y continua de la superficie del ojo. La aplicación de HYLO COMOD FORTE® proporciona una hidratación de larga duración a la córnea y a la conjuntiva, ayudando al proceso fisiológico de cicatrización de las heridas.

HYLO COMOD FORTE® no contiene conservantes, por lo que en general es bien tolerado, ni fosfatos, lo cual evita posibles complicaciones debidas a la formación de depósitos insolubles en la córnea.

¿Cómo debe aplicarse HYLO COMOD FORTE®?

Use únicamente si el precinto de la caja está intacto antes del primer uso.

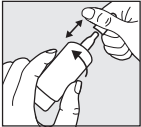

Paso 1

Retire el tapón antes de cada aplicación. Antes de la primera aplicación de HYLO COMOD FORTE®, mantenga verticalmente el envase con la punta hacia abajo y presione arriba hasta que salga la primera gota de la boquilla. Ahora puede proceder a las siguientes aplicaciones.




Paso 2

Mantenga el envase con el gotero hacia abajo, de forma que el pulgar presione abajo del envase y el resto de los dedos se sitúen arriba.



Paso 3

Al aplicarse el colirio, evite el contacto de la punta del envase con el ojo o la piel. Incline la cabeza un poco hacia atrás, exponga suavemente hacia abajo el párpado inferior y presione arriba del envase. De esta forma se activa el mecanismo para la liberación de una gota. Gracias a la tecnología especial de la válvula de HYLO COMOD FORTE®, el tamaño y la velocidad de la gota son idénticos, todas las gotas, independientemente de la presión que se ejerza. Cierre lentamente los ojos para que el líquido se distribuya de forma homogénea sobre la superficie del ojo.

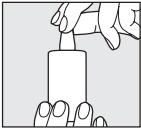

Paso 4

Después de la aplicación, sacuda para que no quede residuo en la boquilla, y coloque enseguida el tapón.

Un frasco con 10 ml de solución corresponde a aproximadamente 300 gotas. Por razones técnicas, siempre queda un pequeño resto en el envase.

Un frasco con 5 ml de solución corresponde a aproximadamente 150 gotas. Por razones técnicas, siempre queda un pequeño resto en el envase.

HYLO COMOD FORTE® es adecuado para el tratamiento a largo plazo y puede ser utilizado en adultos y niños sin limitación de edad.

Cada envase de HYLO COMOD FORTE® debe ser utilizado por una única persona.

Otras indicaciones a tener en cuenta en la aplicación

Si está utilizando otros colirios, espere al menos 30 minutos entre las aplicaciones de los mismos. En ese caso, HYLO COMOD FORTE® deberá ser siempre el último en aplicarse. Sin embargo, los ungüentos oftálmicos siempre deben administrarse después de usar HYLO COMOD FORTE®.

Si no mejora o empeora después de varios días de uso, consulte a su médico.

Debido a que HYLO COMOD FORTE® no contiene conservantes, puede ser empleado para aplicaciones de larga duración. En muy raras ocasiones se han descrito reacciones adversas como hipersensibilidad, escozor, lagrimeo excesivo, dolor, sensación de cuerpo extraño u otras irritaciones locales temporales que desaparecieron tras suspender el uso de HYLO COMOD FORTE®.

Tenga en cuenta que después de la aplicación de HYLO COMOD FORTE® en alguna ocasión podría producirse momentáneamente visión borrosa debido a la viscosidad de la solución oftálmica. En casos muy raros, esto puede causar dolor de cabeza temporal en pacientes muy sensibles.

HYLO COMOD FORTE® alivia los síntomas de sequedad grave o persistente del ojo. Si su oftalmólogo, a pesar de su dolencia, no se lo desaconseja, puede aplicar HYLO COMOD FORTE® incluso con el uso de lentes de contacto. Sin embargo, en estos casos puede provocar una ligera visión borrosa, que desaparecerá tras parpadear durante algunos segundos.

HYLO COMOD FORTE® es compatible con lentes de contacto. Después de ponerse los lentes de contacto y antes de aplicar HYLO COMOD FORTE®, se recomienda esperar unos 30 minutos para evitar posibles reacciones de incompatibilidad entre los productos que se utilizan para el mantenimiento de los lentes de contacto e HYLO COMOD FORTE®.

Según datos actuales, HYLO COMOD FORTE® puede aplicarse también en niños y mujeres embarazadas o en período de lactancia.

¿Con qué frecuencia y durante cuánto tiempo puede aplicarse HYLO COMOD FORTE®?

En general, se aplica una gota de HYLO COMOD FORTE® en el saco conjuntival tres veces al día. Si fuera necesario, podría utilizarse con más frecuencia. En caso de que tuviera que aplicar HYLO COMOD FORTE® más de 10 veces al día o si las molestias persisten, consulte a su oftalmólogo.

¿Cuándo no debe aplicarse HYLO COMOD FORTE®?

En casos de hipersensibilidad a alguno de sus componentes.

Indicaciones para la conservación de HYLO COMOD FORTE®

Conservar a temperatura ambiente.

HYLO COMOD FORTE® puede aplicarse hasta 6 meses después de su apertura inicial.

No aplicar después de la fecha de caducidad.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Presentaciones disponibles:

Dispositivo de 10 ml
Dispositivo de 5 ml

Fecha de la información:

Febrero 2023

Fabricante (ﷲ):

URSAPHARM Arzneimittel GmbH
Industriestraße 35
66129 Saarbrücken
Alemania

Fabricado para ALEXIAPHARMA S.A. (Quito – Ecuador)
Por URSAPHARM (Saarbrücken – Alemania)

Importado y distribuido por:

ALEXIAPHARMA S.A. (Quito - Ecuador)
Reg. San. Alemania: HD 60132728 0001
Reg. San. Ecuador: 2637-DME-0617

VENTA LIBRE

STERILE A

